

# QUIKLITTER™

REF #50-0442


## Rettungs-/Tragetuch

Rote Griffe

Tragfähigkeit: 226 kg

Größe: 187,96 cm x 71, 12 cm

Gewicht: 380 g

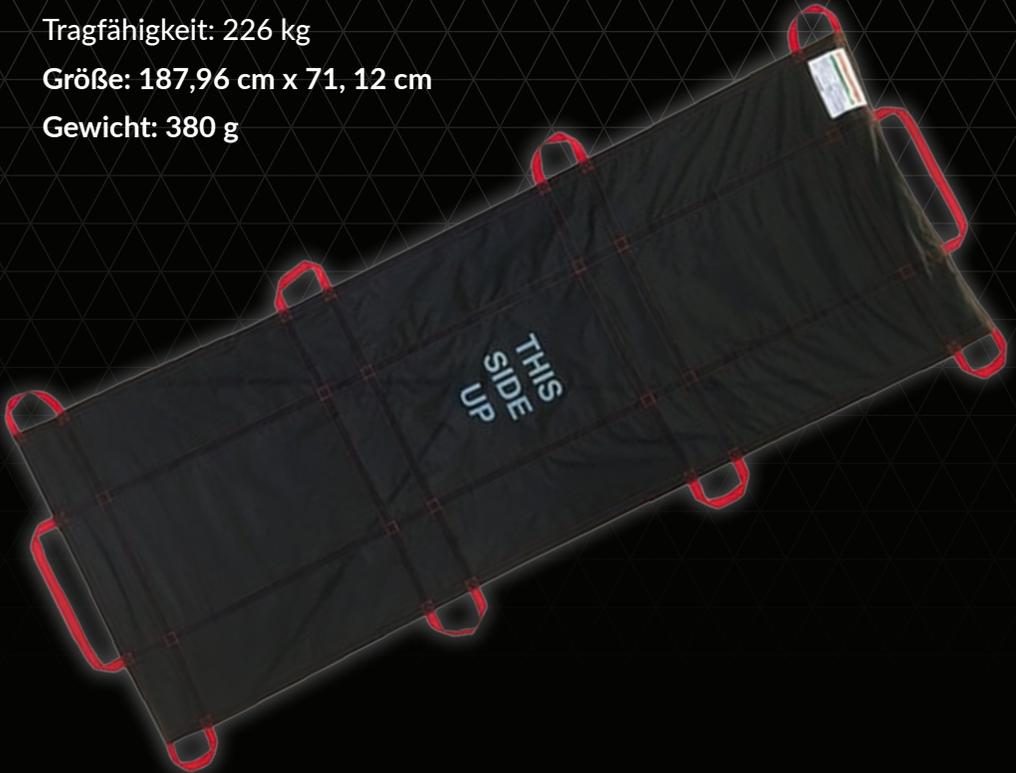

**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286

Hergestellt durch Tri-Tech Forensics, Inc dba Rescue Essentials  
8770 Trade St, Leland, NC 28451 USA



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Importeur DE & AT  
WERO GmbH & Co. KG  
Idsteiner Straße 94  
D-65232 Taunusstein  
+49 6128 9757-0  
[info@wero.de](mailto:info@wero.de) [www.wero.de](http://www.wero.de)



# QuikLitter™ Anleitung

Der QuikLitter™ ist für den Transport von bis zu 226 kg bemessen. Es wird empfohlen, für Transport und Transfer mindestens vier Personen einzusetzen, um die Möglichkeiten eines Unfalls oder von Verletzungen zu minimieren. Nicht empfohlen, wenn die Wirbelsäulenstabilität eine Rolle spielt. Die unsachgemäße Handhabung oder Nutzung eines beschädigten QuikLitter™ kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen.

## KONTRAINDIKATIONEN UND WARNHINWEISE

- Verwenden Sie den QuikLitter™ nicht, wenn das Gerät übermäßig abgenutzt oder durchlöchert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Objekten.
- Vermeiden Sie das Ziehen des QuikLitter™ über raue Oberflächen.
- Lagern Sie den QuikLitter™ nicht in Kontakt mit Wärmequellen von mehr als 88°C.
- Nicht zu verwenden in Verbindung mit sonstigen mechanischen Hebevorrichtungen mit vertikaler oder horizontaler Bewegung.

## PATIENTENTRANSPORT

- Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit von 226 kg.
- Patienten mit mindestens 4 Personen heben.
- Stellen Sie eine geeignete Grifftechnik sicher, bevor Sie den Patienten anheben.

## REINIGUNG

- Wenn verschmutzt, kann die QuikLitter™ mit einem feuchten Tuch mit Seife, Waschmittel oder einem milden Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- Nicht in der Waschmaschine waschen.
- Wenn das gesamte Gerät kontaminiert ist, legen Sie es in einen roten Risikoabfallsack und entsorgen Sie es entsprechend Ihres Protokolls für Gefahrstoffabfälle.
- Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln.

## VORGESEHENE NUTZUNG

Der QuikLitter™ ist für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal für die allgemeine Patientenstabilisierung, Transport und Transfer gedacht. Aufgrund des leichten Gewichts und der kompakten Bauweise des Rettungs-/Tragetuch eignet es sich besonders für harte Umgebungen, in denen eine schnelle Evakuierung notwendig ist.

*Hinweis: Jeder schwere Zwischenfall, der sich in Bezug auf dieses Rettungs-/Tragetuch ereignet, sollte an Tri-Tech Forensics und die zuständige Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Nutzer und/oder der Patient ansässig sind, gemeldet werden.*

 Medizinprodukt	 Bevollmächtigter in der europäischen Gemeinschaft	 Fertigungsnummer, Charge	 Länder-Code
 Enthält kein Naturkautschuk-latex	 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten	 Herstellungsdatum