

TILSIGTET FORMÅL:

Slishman Traction Splint er beregnet til brug af sundhedspersonale til stabilisering og traktion af lårbensbrud. Enheden kan også bruges som en simpel skinne til brud, forstrækninger eller forstuvninger i alle ekstremiteter.

RENGØRINGSVEJLEDNING:

Efter hver brug skal Slishman Traction Splint inspiceres for at sikre, at den stadig er i god stand. Skinnen skal rengøres grundigt ved at vaske den med vand og desinfektionsmiddel og derefter tørres af med en ren klud. Hvis skinnen kommer i kontakt med giftstoffer som organofosfater, radioaktivt materiale eller store mængder kropsvæsker, skal den bortskaffes på samme måde som farligt materiale eller biologisk affald. Hvis den kan vaskes og desinficeres, er genbrug acceptabelt.

Brug ikke blegemiddel. Fjern eller løsn ikke stropper i forbindelse med rengøring. Den ydre rørstrop af neoprene må ikke rengøres med varmt vand, da det kan medføre krympning eller delaminering. Tør i stedet stroppen grundigt af med desinficerende servietter. STS skal betragtes som engangsudstyr, hvis den er meget forurenet, hvis rengøring kræver en stor indsats, eller hvis enheden eller en af dens mekanismer er blevet beskadiget ved brug. Rescue Essentials erstatter enhver Slishman Traction Splint, der bruges til træning, og som bliver slidt eller går i stykker på grund af kontinuerlig brug.

ADVARSLER:

Slishman Traction Splint kan bruges som en grundlæggende skinne til at hjælpe med at immobilisere enhver skade. Traktion kan overvejes ved hofte-, bækken- eller humerusfrakturer, hvis et testtræk i trækssnor giver øjeblikkelig smertelindring eller genoprettelse af blodgennemstrømning. Traktion bør undgås ved store åbne og kontaminerede frakturer, hvor traktion kan risikere at trække kontaminanter ind i kroppen.

Fremstillet af Tri-Tech Forensics, Inc. dba
Rescue Essentials 3811 International Blvd
NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-0262



NSN: 6515-01-631-3182

NATO: 6515-32-083-5266



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague
Holland

RESCUE ESSENTIALS

North Carolina USA • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com

BÆRETASKE

STROP
TIL
BENET
MIDT
PÅ

TRÆKSNOR

ENDEPROP

DISTAL KLEMME

PROKSIMAL KLEMME

ANKELSTROP

LYSKESTROP

HANSPENDE

HUNSPENDE

Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til Tri-Tech Forensics og til den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patient er etableret.

MD	Medicinsk udstyr	UDI	Unik enhedsidentifikator	EC REP	Autoriseret europæisk repræsentant	SN	Serienummer		Data for fremstilling
LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Producent		Se instruktioner	LOT	Partnummer		

Patenter i USA: 6,394,972 - 6,786,882 - 6,913,587
Overholder MIL-STD-810G, 501.5
Europæisk patent (DE, FR, UK) Nr. 3226817
Canadisk patent 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

Slishman Traction Splint (STS)

BRUGERVEJLEDNING

RESCUE ESSENTIALS



Prior to application assess CMS (circulation, motor and sensory) function and pain level per local protocol.

1. Påsættelse af ankelstrop

- Fjern ankelstrop og endeprop fra stangen
- Rul ankelstrop ud, og sæt den på med endeprop på siden og opad for at modtage skinnen
- Fastgør med krog og løkke

BEMÆRK: Der kan anvendes ankelstrop ovenover læggen i tilfælde af skader på underbenet.





2. Påsætning af lyskestrop

- Lad hunspænde hvile på forsiden af låret
- Vikl hanspændet og stroppen bag om låret
- Klik hanspænde til hunspænde, og stram til



3. Anvendelse af kraftigt træk

- Forlæng den distale stang efter at have løsnet fingerskruen på den sorte stangklemme
- Sæt den distale stang ind i ankelstrop endeprop
- Når den ønskede længde er opnået, strammes fingerskruen

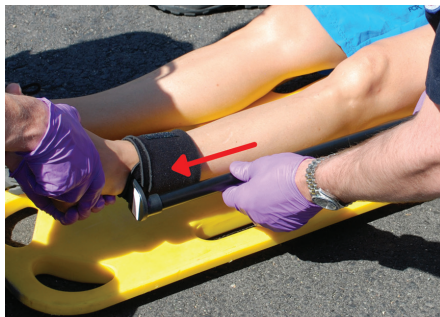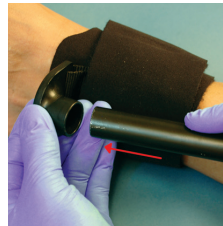

4. Anvendelse af let træk

- Løsn fingerskruen på den røde stangklemme
- Træk i snoren for at opnå det ønskede træk
- Stram fingerskruen på den røde stangklemme, og slip snoren



5. Revurdering og overvågning

- Revurder CMS og smerteniveau
- Juster trækket efter behov for at minimere smerter og samtidig opretholde blodgennemstrømning
- For at opnå rotationsstabilitet sættes stroppen til benet midt på på skinnen og vikles om (et eller begge ben) under knæet



PÆDIATRISK ANVENDELSE

For patienter under 110 cm (ca. 43 tommer) i højden og/eller 3 år eller derunder skal lyskestrop forlænges, så skinnen hviler mere proksimalt på hoften.



BEMÆRK: HVIS KLEMMEN GLIDER AF STANGEN

Hvis den røde eller sorte stangklemme glider af stangen, skal fingerskruen blot løsnes og stangklemmen skubbes tilbage over enden af stangen og den skal justeres, hvor det er markeret. Stram fingerskruen for at holde den på plads.

