

ÚČEL POUŽITIA:

Slishman Traction Splint je trakčná dlahu určená na používanie zdravotníkmi na stabilizáciu a trakciu zlomených stehenných kostí. Zdravotnícku pomôcku možno použiť aj ako jednoduchú dlahu na bežnú zlomeninu končatiny, natiahnutie alebo vyvrtnutie.

NÁVOD NA ČISTENIE:

Trakčnú dlahu Slishman Traction Splint je po každom použití potrebné skontrolovať, aby ste sa uistili, či je stále v dobrom prevádzkovom stave. Dlahu je potrebné dôkladne očistiť umytím vodou a dezinfekčným prostriedkom a potom utrieť čistou handričkou. Ak sa dlaha dostane do kontaktu s toxínmi ako sú organofosfáty, rádioaktívny materiál alebo nadmerné telesné tekutiny, potom sa musí zlikvidovať tak, ako to platí pre nebezpečné látky alebo biologický odpad. Ak sa dá umyť a dezinfikovať, opätovné použitie je prijateľné. Nepoužívajte bieliadlo. Pri čistení neodstraňujte ani neuvolňujte žiadne popruhy. Neoprénový popruh vonkajšej tyče nečistite horúcou vodou, mohla by spôsobiť zrazenie alebo oddelenie vrstiev. Namiesto toho popruh dôkladne poutierajte dezinfekčnými obrúskami. STS je potrebné považovať za jednorazovú, ak je silne kontaminovaná, ak si čistenie vyžaduje nadmerné úsilie alebo ak sa pomôcka alebo niektorý z jej mechanizmov pri používaní poškodí. Rescue Essentials nahradí každú trakčnú dlahu Slishman Traction Splint používanú na učenie sa, ktorá sa opotrebuje alebo zlomí v dôsledku nepretržitého používania.

POZOR:

Trakčnú dlahu Slishman Traction Splint je možné používať na znehybnenie bežného zranenia ako základnú dlahu. Pri zlomenine bedra, panvy alebo ramennej kosti sa môže zväžiť trakcia, ak skúšobné potiahnutie trakčného lanka poskytuje okamžitú úľavu od bolesti alebo obnovenie perfúzie. Trakcii je potrebné zabrániť aj pri výrazne otvorených a kontaminovaných zlomeninách, kde sa pri trakcii môže riskovať vniknutie kontaminantov do tela.kontaminantov do tela.

Vyrába Tri-Tech Forensics, Inc.
dba Rescue Essentials 3811 International
Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-0262



NSN: 6515-01-631-3182

NATO: 6515-32-083-5266



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague
Holandsko

RESCUE ESSENTIALS

North Carolina USA • 910-830-0286
www.rescue-essentials.com



Každý závažný incident, ktorý sa v súvislosti s touto pomôckou vyskytne, je potrebné nahlásiť spoločnosti Tri-Tech Forensics a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ a/alebo pacient sídlo.

MD	Zdravotnícka pomôcka	UDI	Jedinečný identifikátor pomôcky	EC REP	Autorizovaný európsky zástupca	SN	Výrobné číslo		Dátum výroby
LATEX	Produkt neobsahuje prírodný kaučuk		Výrobca		Precítajte si návod na použitie	LOT	Číslo šarže		

Patenty USA: 6 394 972 - 6 786 882 - 6 913 587
Splňa normy: MIL-STD-810G, 501.5
Európsky patent (DE, FR, UK) č. 32268177
Kanadský patent 3007222

SLISHMAN TRACTION SPLINT

by

RESCUE ESSENTIALS

NÁVOD NA POUŽITIE

Slishman Traction Splint (STS)

NÁVOD NA POUŽITIE

RESCUE ESSENTIALS



1. Pripojte členkový popruh

- Z tyče odstráňte členkový popruh a koncovú krytku
- Rozviňte členkový popruh a pripievajte ho tak, aby bola koncová krytka zboku a smerovala nahor, aby ste do nej vedeli tyč vložiť
- Zaistite pomocou háčika a slučky



POZNÁMKA: V prípade poranenia spodnej časti nohy môžete členkový popruh umiestniť nad lýtko.



Pred použitím, podľa miestneho protokolu, posúďte CMS funkcie (prúdenie krvi, motoriku a citlivosť) a stupeň bolesti.

2. Pripevnenie bedrového popruhu

- Položte samičiu časť spony na prednú časť stehna
- Pretiahnite popruh so samčou časťou spony popod stehno
- Zacvaknite samčiu časť spony k samičej a utiahnite



3. Použite pevnú trakciu

- Po uvoľnení palcovej skrutky na čiernej tyčovej svorke predĺžte distálnu tyč
- Vložte distálnu tyč do koncovkej krytky členkového popruhu.
- Po dosiahnutí požadovanej dĺžky palcovú skrutku utiahnite



4. Použite jemnú trakciu

- Povoľte palcovú skrutku na červenej tyčovej svorke
- Potiahnutím lanka aplikujte požadovanú trakciu
- Na červenej tyčovej svorke utiahnite palcovú skrutku a lanko uvoľnite



5. Opätovné posúdenie a sledovanie

- Opätovne posúďte CMS a stupeň bolesti
- Upravte trakciu podľa potreby, aby ste minimalizovali bolesť, a zároveň zachovali perfúziu
- Pre rotačnú stabilitu pripievajte stredný nožný popruh na dlahu a omotajte (jednu alebo obe nohy) pod kolenom



POUŽITIE U DETÍ

U pacientov s výškou menej ako 110 cm (približne 43 palcov) a/alebo vo veku do 3 rokov bedrový popruh predĺžte tak, aby bolo dlahu možné umiestniť bližšie k bedrovému kĺbu.



POZNÁMKA: AK SVORKA SKLÍZNE Z TYČE

V prípade, že červená alebo čierna svorka sklízne z tyče, jednoducho uvoľníte palcovú skrutku a zatlačíte tyčovú svorku späť cez koniec tyče a zarovnáte na označenom mieste. Uťahnutím palcovej skrutky ju zaistíte na mieste.

