

Slushman Traction Splint - Compact (STS-C)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

RESCUE ESSENTIALS



Spyruoklinis mygtukas

1. Jei pacientas aukštesnis nei 1,5 m (5 pėd.), vidurinį vamzdelį traukite iš išorinio, kol spyruoklinis mygtukas užsifiksuos.



Taikyti proksimaliai prie blauzdos arba kelio girkelės

2. Neopreno išorinio vamzdelio dirželį tvirtai pritvirtinkite prie blauzdos ar kelio girkelės.



Kirkšnies dirželio sagtis

3. Pritvirtinkite juodą kirkšnies dirželį ir reguliuokite, kad gerai priglustų prie viršutinės šlaunies dalies.



Patraukite, kad būtų trauka

4. Švelniai traukite traukos virvę, kol sumažės skausmas.



V formos įpjova

5. Užfiksuokite virvę, traukdami žemyn į V formos įpjovą vidinio vamzdelio viršuje.



Skląsčių sparnai

6. Užfiksuokite laisvą traukos virvės galą, jį vieną kartą apvyniodami aplink abu skląsčių sparnus.



„Slushman Pressure Wrap“ sukimosi stabilumui užtikrinti

7. Stabilizuokite* sužeistą galūnę ir paminkštinkite ją, kad būtų patogiu.



Stebėkite CSM

8. Atidžiai stebėkite kraujotaką, pojūčius ir motorinę funkciją (CSM) ir, jei reikia, koreguokite.



Pediatrinis naudojimas

Pastaba. Jei pacientai yra žemesnio ūgio arba vaikai, prireikus prie kulkšnies pritvirtinkite neopreno dirželį, kad jis geriau priglustų.

*Stabilizaciją galima atlikti naudojant daugybę priemonių, įskaitant pagalves, antklodes, nugaros lentos dirželius, vakuuminius įtvarus, kalibrinius įtvarus arba langečių įtvarus. Į komplektą įtraukta priemonė „Slushman Pressure Wrap“, padedanti užtikrinti stabilumą sukimosi metu, taikant šiuos veiksmus:

1. Abi pėdas apvyniokite elastiniu apvyniojamuoju tvarsčiu kilpomis. Kilpa neturi būti įtempta.
2. Priešingą pėdą apjuoskite taip, kad abi pėdos būtų greta, ir taip užtikrinkite stabilumą sukantis. Apvyniodami baltus kabliukus pritvirtinkite prie juodo audinio.
3. Toliau vyniokite iki elastinės juostos galo, o baltus kabliukus pritvirtinkite po etikete prie juodo audinio.
4. Jei manote, kad tai naudinga, etiketėje paskirtoje vietoje įrašykite naudojimo laiką. (Apvyniojimas taip pat gali būti naudojamas kraujavimui apriboti, kaip ir bet koks elastinis spaudžiamasis tvarstis.)



Slushman Traction Splint - Compact (STS-C)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

RESCUE ESSENTIALS

NUMATYTOJI PASKIRTIS

Priemonė „Slushman Traction Splint“ skirta sveikatos priežiūros specialistams, kad jie galėtų stabilizuoti ir traukti lūžusius šlaunikaulius. Šią priemonę taip pat galima naudoti kaip paprastą įtvarą, skirtą bet kokiam galūnės lūžiui, patempimui ar išnirimui gydyti.

ISPĖJIMAI

„Slushman Traction Splint“ galima naudoti kaip pagrindinį įtvarą, padedantį bet kokiam sužalojimui imobilizuoti. Trauką galima naudoti klubo, dubens ar žastikaulio lūžiams gydyti, jei bandomasis traukos virvutės traukimas iš karto palengvina skausmą arba atkuria perfuziją. Taip pat traukos reikėtų vengti tuomet, kai lūžiai yra atviri ir užteršti, kai dėl traukos gali kilti pavojus, kad į kūną pateks teršalai.

PASTABA

Apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su šia priemone, reikėtų pranešti „Tri-Tech Forensics“ ir valstybės narės, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

VALYMO INSTRUKCIJOS

Po kiekvieno naudojimo „Slushman Traction Splint“ reikia apžiūrėti, kad įsitikintumėte, jog jis vis dar geros būklės. Įtvarą reikia kruopščiai išvalyti nuplaunant vandeniu su dezinfekuojamąja priemone ir nušluostyti švari skudurėliu. Jei įtvaras turi sąlytį su toksiniais, pavyzdžiui, organofosfatais, radioaktyviomis medžiagomis arba per dideliu kūno skysčių kiekiu, jį reikia šalinti, kaip nustatyta pavojingoms medžiagoms ar biologinėms atliekoms. Jei jį galima nuplauti ir dezinfekuoti, jį galima naudoti pakartotinai. Nenaudokite baliklio. Valydami nenuimkite ir neatlaisvinkite jokių dirželių. Neopreno išorinio vamzdelio dirželio negalima valyti karštu vandeniu, nes jis gali susitraukti arba atsiskuoksnuoti. Verčiau dirželį kruopščiai nuvalykite dezinfekuojančiomis šluostėmis. STS turėtų būti laikomas vienkartinis, jei jis yra smarkiai užterštas, jei valymas reikalauja didelių pastangų arba jei priemonė ar bet kuris jos mechanizmas buvo pažeistas naudojant. Bendrovė „Rescue Essentials“ pakeis bet kurį mokymams naudojamą „Slushman Traction Splint“ įtvarą, kuris dėl nuolatinio naudojimo susidėvėjo arba sulūžo.

„STS-C“ KOMPONENTAI



 Gamintojas: „Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials“, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 JAV

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Patento Nr.: JAV 11,324,624 B2, patento data: 05102022

Pagaminta pagal JAV patentus: 10,517,750 ir 11,324,624

Europos patentas (DE, FR, UK) Nr. 3226817 – Kanados patentas 3007222



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nyderlandai

MD	Medicinos priemonė	UDI	Unikalus priemonės identifikatorius	EC REP	Igaliojasis atstovas Europoje	SN	Serijos numeris		Pagaminimo data
	Pagaminta naudojant natūralios gumos lateksą		Gamintojas		Žr. naudojimo instrukcijas	LOT	Partijos numeris		

