

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

RESCUE ESSENTIALS

*Vaikams arba suaugusiems, kuriems kartu yra ir apatinės galūnės sužalojimas, šį veiksmą praleisti.



1. Aukštesniems nei 1,5 m (5 pėd.) ūgio pacientams traukite sidabrinį vidurinį vamzdelį iš juodo išorinio vamzdelio, kol spyruoklinis mygtukas užsifiksuos vidurinėje arba proksimalinėje skylėje.



4. Švelniai traukite traukos virvę, kol sumažės skausmas.



7. Stabilizuokite* sužeistą galūnę ir paminkštinkite ją, kad būtų patogiu.



2. Prie kulkšnies tvirtai pritvirtinkite neopreno išorinio vamzdelio dirželį. Jei kartu yra ir apatinės galūnės sužalojimas, diržą uždėkite arčiau blauzdos arba kelio girnelės.



5. Užfiksuokite virvę, traukdami žemyn į V formos įpjovą vidinio vamzdelio viršuje.



8. Atidžiai stebėkite kraujotaką, pojūčius ir motorinę funkciją (CSM) ir, jei reikia, koreguokite.



3. Pritvirtinkite raudoną kirkšnies dirželį ir reguliuokite, kad jis gerai priglustų prie viršutinės šlaunies dalies.



6. Užfiksuokite laisvą traukos virvės galą, jį vieną kartą apvyniodami aplink abu skląsčių sparnus.



Pastaba. Jei pacientai yra žemesnio ūgio arba vaikai, prireikus kirkšnies dirželį pailginkite, kad jis geriau priglustų.

*Stabilizaciją galima atlikti naudojant daugybę priemonių, įskaitant pagalves, antklodes, nugaros lentos dirželius, vakuuminius įtvarus, kalibrinius įtvarus arba langečių įtvarus. Į komplektą įtraukta priemonė „Slishman Pressure Wrap“, padedanti užtikrinti stabilumą sukimosi metu, taikant šiuos veiksmus:

1. Abi pėdas apvyniokite elastiniu apvyniojamuoju tvarščiu kilpomis. Kilpa neturi būti įtempta.
2. Priešingą pėdą apjuoskite taip, kad abi pėdos būtų greta, ir taip užtikrinkite stabilumą sukantis. Apvyniodami baltus kabliukus pritvirtinkite prie oranžinės medžiagos..
3. Toliau vyniokite iki elastinės juostos galo, o baltus kabliukus pritvirtinkite po etikete prie oranžinio audinio.
4. Jei manote, kad tai naudinga, etiketėje paskirtoje vietoje įrašykite naudojimo laiką. (Apvyniojimas taip pat gali būti naudojamas kraujavimui apriboti, kaip ir bet koks elastinis spaudžiamasis tvarstis.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

RESCUE ESSENTIALS

NUMATYTOJI PASKIRTIS

Priemonė „Slishman Traction Splint“ skirta sveikatos priežiūros specialistams, kad jie galėtų stabilizuoti ir traukti lūžusius šlaunikaulius. Šią priemonę taip pat galima naudoti kaip paprastą įtvarą, skirtą bet kokiam galūnės lūžiui, patempimui ar išnirimui gydyti.

ISPĖJIMAI

„Slishman Traction Splint“ galima naudoti kaip pagrindinį įtvarą, padedantį bet kokiam sužalojimui imobilizuoti. Trauką galima naudoti klubo, dubens ar žastikaulio lūžiams gydyti, jei bandomasis traukos virvutės traukimas iš karto palengvina skausmą arba atkuria perfuziją. Taip pat traukos reikėtų vengti tuomet, kai lūžiai yra atviri ir užteršti, kai dėl traukos gali kilti pavojus, kad į kūną pateks teršalai.

PASTABA

Apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su šia priemone, reikėtų pranešti „Tri-Tech Forensics“ ir valstybės narės, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

VALYMO INSTRUKCIJOS

Po kiekvieno naudojimo „Slishman Traction Splint“ reikia apžiūrėti, kad įsitikintumėte, jog jis vis dar geros būklės. Įtvarą reikia kruopščiai išvalyti nuplaunant vandeniu su dezinfekuojamąja priemone ir nušluostyti švari skudurėliu. Jei įtvaras turi sąlytį su toksinais, pavyzdžiui, organofosfatais, radioaktyviomis medžiagomis arba per dideliu kūno skysčių kiekiu, jį reikia šalinti, kaip nustatyta pavojingoms medžiagoms ar biologinėms atliekoms. Jei jį galima nuplauti ir dezinfekuoti, jį galima naudoti pakartotinai. Nenaudokite baliklio. Valydami nenuimkite ir neatlaisvinkite jokių dirželių. Neopreno išorinio vamzdelio dirželio negalima valyti karštu vandeniu, nes jis gali susitraukti arba atsiskuosniuoti. Verčiau dirželį kruopščiai nuvalykite dezinfekuojančiomis šluostėmis. STS turėtų būti laikomas vienkartinis, jei jis yra smarkiai užterštas, jei valymas reikalauja didelių pastangų arba jei priemonė ar bet kuris jos mechanizmas buvo pažeistas naudojant. Bendrovė „Rescue Essentials“ pakeis bet kurį mokymams naudojamą „Slishman Traction Splint“ įtvarą, kuris dėl nuolatinio naudojimo susidėvėjo arba sulūžo.

„STS GENERATION 2“ KOMPONENTAI



Gamintojas: „Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials“,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 JAV



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nyderlandai

REF #10-5000

Ruošiamas NSN

JAV patentai: 10,517,750 ir 11,324,624



MD	Medicinos priemonė	UDI	Unikalus priemonės identifikatorius	EC REP	Igaliojimas atstovauti Europoje	SN	Serijos numeris		Pagaminto data
LATEX	Pagaminta naudojant natūralios gumos lateksą		Gamintojas		Žr. naudojimo instrukcijas	LOT	Partijos numeris		

